


# NÁVOD NA ZMĚNU NASTAVENÍ MATRACÍ SÁRA PLUS A ZORA

## Matrace **SÁRA PLUS**


### Postup při změně nastavení matrace SÁRA PLUS:

1. otočte matraci horní stranou směrem dolů (strana s výšivkou)
2. rozepněte zdrhovadlo potahu, odklopte spodní bavlněný díl potahu
3. rozepněte všechny tři podélné bavlněné kapsy, které jsou rovněž opatřeny zdrhovadlem
4. v těchto kapsách jsou podélné nosníky a každý z nich je rozdělen na tři části (tyto části jsou odlišeny barevně)
5. do středu těchto nosníků je vloženo podélné jádro, jehož výměnou dochází k požadované změně tuhosti celé matrace
6. změna tuhosti na měkčí (do 60 kg), ze zelené části nosníku - **oblast pod ramenem** - vyjměte podélné jádro (tato část zůstane prázdná), z růžové části nosníku - **oblast pod kyčlí** - vyjměte podélné jádro a nahraďte ho zeleným podélným jádrem
7. podélníky vložte zpět do kapsy a zapněte celou matraci, (pokud by i po tomto nastavení byla matrace příliš tvrdá stačí růžovou část podélníku oblast pod kyčlí nahradit zelenou částí z oblasti pod nohama)
8. změna tuhosti na tvrdší (nad 80 kg), ze zelené částí nosníku - **oblast pod ramenem** - vyjměte podélné jádro a nahraďte ho růžovým jádrem a do růžové části nosníku - **oblast pod kyčlí** - vložte oranžové jádro, které je vždy v příbalové sadě matrace a je její součástí.


### STANDARDNÍ NASTAVENÍ Z VÝROBY 60 - 80 kg

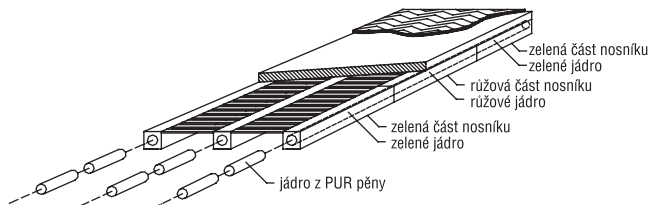

### NASTAVENÍ do 60 kg

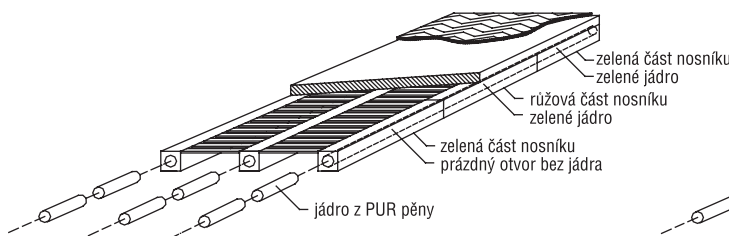

### NASTAVENÍ nad 80 kg

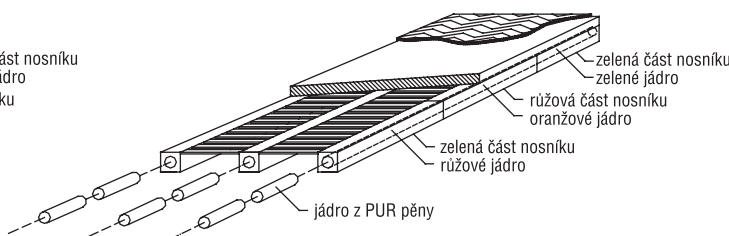

Barevné označení tvrdosti jader dle váhových kategorií pro matraci SÁRA PLUS:

- do 60 kg bez jádra
- 60 - 80 kg růžová
- nad 80 kg - oranžová

U uživatelů se zvýšeným bodovým tlakem na kyčel nebo rameno je možno v této oblasti podélné jádro rozdělit (rozstříhnout) a v dané oblasti nechat místo úplně prázdné.

## Matrace **ZORA**

U matrace ZORA lze využít velkou variabilitu nastavení a to jak tvrdosti pružení, tak i možnosti vytvoření zónových oblastí:

- matrace ZORA je už z výroby nastavena na střední váhovou kategorii (60 - 80 kg) včetně změkčení v oblasti ramen a kyčlí
- podle délky vašeho těla doporučujeme posunout změkčení v oblasti kyčlí
- pro nižší váhovou kategorii doporučujeme vyměnit jádra z PUR pěny za měkčí
- pro vyšší váhovou kategorii doporučujeme vyměnit jádra z PUR pěny za tvrdší

### Postup při změně nastavení matrace ZORA:

1. otočte matraci horní stranou směrem dolů (strana s výšivkou)
2. rozepněte zdrhovadlo potahu, odklopte spodní bavlněný díl potahu
3. rozepněte všechny tři podélné bavlněné kapsy, které jsou rovněž opatřeny zdrhovadlem
4. v těchto kapsách se nachází nosníky, které jsou opatřeny otvory pro vkládání jader z PUR pěny
5. z otvorů nejprve vyjměte nevhovující jádra, potom vsuňte do těchto otvorů jádra se správnou tuhostí
6. do oblastí ramen a kyčlí doporučujeme vložit jádra s nižší tvrdostí, případně nechat otvory zcela bez jader
7. kapsy nosníků a potah matrace zpět důkladně zapněte

Barevné označení tvrdosti jader dle váhových kategorií pro matraci ZORA:

- do 60 kg zelená
- 60 - 80 kg modrá
- nad 80 kg růžová



**JELÍNEK** - výroba nábytku s.r.o.

Palackého 21, 757 01 Valašské Meziříčí  
e-mail: [info@jelinek.eu](mailto:info@jelinek.eu), [www.jelinek.eu](http://www.jelinek.eu)

Tel.: +420 571 75 98 11, tel./fax.: +420 571 75 98 12